



PINTOJEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO

# EASYDES

PESEVÄ PINTADESINFEKTIOAINE



## Käyttöalue

Easydes on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen pesevä pintadesinfektioaine. Easydes sopii kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille. Se sopii useimmille muovimateriaaleille myös hammas-huollon osa-alueella.

## Ominaisuudet

Easydes on etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Easydes on mikrobisidisesti laajatehoinen, nopeavaikutteinen sekä orgaanista rasiusta kestävä. Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet. Desinfektioiteho saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Easydes poistaa hyvin lian ja rasvan. Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN 13697 (bakteerit ja sienet), EN 13713 bakterisidinen teho, myös MRSA-kannat, EN 14348 (mykobakteerit M. terrae ja M. avum), EN 1650 fungisidinen teho sekä virusidisen tehon testit EN 14476 (adenovirus), BVDV ja vaccinia. Myös teho norovirukseen on todennettu (30s).

## Käyttöohje

Easydes pesevä desinfektioaine on käyttövalmis liuos. Annostelu: Kostuta pinnan pyyhinnässä käytettävä taitos/siivousliina desinfektioaineella. Huomioi riittävä kosteus. Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti. Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa. Pintoja ei yleensä tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfioidun pinnan on oltava ehdottoman jäämävapaa, voidaan pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfioinnin jälkeen. Desinfektio on tapahtunut, kun pyyhitty pinta on kuiva.

## Huomioitavaa

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää kuumille pinnoille. Syttyvää. Clostridium difficile epidemioissa suosittelomme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

## Koostumus

Etanoli	55-60 p-%	biosidi
Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine
Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho
Alkyyliamiini	< 0,5 %	biosidi

## Ulkonäkö ja tuoksu pH tiivisteessä Varastointi Valmistusmaa

Kirkas neste  
10,0  
Huoneenlämmössä 3 v.  
Suomi

## Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

## Pakkauskoko/ tuotekoodi

	Kiiltoclean	EAN	Sailab
15x150 ml suihkepullo	8221	641260 008221 0	20070223
6x500 ml pullo	8081	641260 008081 0	20070223
3x5 l kanisteri	8082	641260 008082 7	20070223

## Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

